


**INSTRUKCJA - Tri-Gym**

**Urządzenie do treningu oddechu (trenażer oddechowy) w dwóch niezależnych trybach pracy: wdechu i/lub wydechu z możliwością ustawienia oporności przez regulację zaworów dla obu trybów.**

Aparat składa się z trzech stopniujących cylindrów wskazujących szybkość przepływu powietrza (600, 900, 1200 ml/s). Różnokolorowe kuleczki w cylindrach wskazują przybliżony w danej chwili przepływ powietrza przez aparat. Przyrząd jest również wyposażony w dwa regulowane zawory, które kontrolują opór wdechu i niezależnie opór wydechu. W zestawie znajduje się również rura z ustnikiem.

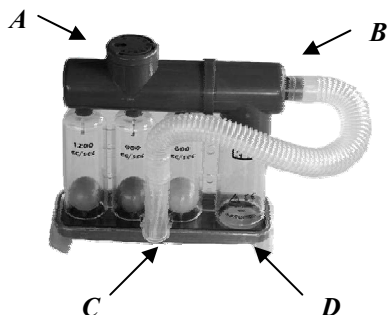

KOD	NAZWA
KM- 805	Tri-Gym

Wyjmij aparat z opakowania, sprawdź wszystkie części i złącz je ze sobą.

**A. ĆWICZENIA WYDECHU**

1. Przekręć zawór znajdujący się na wierzchniej części aparatu (A) aż do uzyskania pożądanego oporu powietrza.
2. Numery od 0 do 8 wskazują opór wydechu w sposób narastający. Jest możliwe monitorowanie wartości oporności dodatniego ciśnienia poprzez podłączenie manometru pomiędzy główną częścią aparatu a rurą w punkcie (B).
3. Używając ustnika (C) należy wypuszczać z siebie powietrze do urządzenia powodując podnoszenie się kolorowych kulek w zależności od siły przepływu powietrza.

**B. ĆWICZENIA WDECHU**

1. Przekręć zawór znajdujący się na spodniej części aparatu (D) aż do uzyskania pożądanego oporu powietrza.
2. Numery od 0 do 9 wskazują opór wdechu w sposób narastający. Jest możliwe monitorowanie wartości oporności ujemnego ciśnienia poprzez podłączenie manometru pomiędzy główną częścią aparatu a rurą w punkcie (B).
3. Używając ustnika (C) należy wciągać do siebie powietrze z urządzenia powodując podnoszenie się kolorowych kulek w zależności od siły przepływu powietrza.

Oba ustawienia są niezależne od siebie. Można jednocześnie ćwiczyć wdech i wydech lub osobno każdą z tych czynności.

**UWAGA:**

Produkt przeznaczony jest dla pojedynczego pacjenta. Produkt niesterylizowany. Bez lateksu.

**MYCIE i DEZYNFEKCJA:**

Używaj delikatnych środków myjących. Nie sterylizuj i nie używaj przez więcej niż jednego pacjenta. Po zaleconym okresie używania wyrzuć produkt zgodnie z normalnymi procedurami.

**OSTRZEŻENIE:**

Używanie aparatu musi odbywać się pod okiem i według wskazówek lekarza specjalisty.

PRODUCENT: KOO MEDICAL EQUIPMENT (Shanghai) Co. Ltd., 1 Songjiang Industrial Park, Songjiang Shanghai, 201613 P.R. CHINA  
Representative Authorized for CE in Europe and Distributed by: Koo Europe S.r.l., Via della Praia 12/D, 10090 Buttigliera Alta (TO) - ITALY

**Dystrybutor w Polsce:**

**Mediserv International**

**ul. Leszno 34/36, 01-199 Warszawa,**

**www.mediserv.pl, tel. kom.0692-495196, tel. 22-6327698, fax. 22-6327392**